



Tourniquet Touch TT20

Biztosan üres marad.

Tartalomjegyzék

Használati utasítás

1. Szöveggelölés és szimbólumok	4
2. A készülék rendeltetése	4
3. Javallat / ellenjavallat	4
4. Biztonsági utasítások	4
5. Szállítási teljesség	5
6. Termékleírás	5
7. Műszaki specifikáció, technikai adatok	6
8. Görülő állvány	6
9. Kezelőgombok és szimbólumok	7
10. A fő képernyő	8
10.1 Beállítások	10
11. Üzembe helyezés	11
12. A működőképesség ellenőrzése	11
13. Használat	12
13.1 Használat szimpla mandzsettával	12
13.2 Használat két szimpla mandzsettával bilaterális sebészet esetén	12
13.3 Használat dupla mandzsettával (IVRA)	12
14. Riasztások	13
14.1 A riasztások fajtái és rangsora	13
14.2 A beállított idő letelt (időzített riasztás)	14
14.3 A riasztási hang megszakítása	14
15. Hibaelhárítás	15
15.1 Önteszt	15
15.2 Hibák a használat során	15
15.3 Általános hibák	18
16. Elektromágneses kompatibilitási (EMC) táblázat	18

A készülék karbantartása és ellenőrzése



17. Karbantartás	19
17.1 Ellenőrzés	19
17.1.1 Kalibrálás	19
17.1.2 Önellenőrzés	20
17.1.3 Szivárgásvizsgálat	20
17.2 Biztosítékcseré	21
18. A készülék visszaküldése javításra	21
19. Fertőtlenítés törléssel	21
20. A készülék élettartama	21
21. Tennivalók a használatból kivont készülékkel, hulladékkezelés	21
22. Cikkszámok	22
23. Szimbólumok	23

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra.

A kezelési útmutató fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz, amelyeket a készülék használata során be kell tartani.

1. SZÖVEGJELÖLÉS ÉS SZIMBÓLUMOK

Szimbólum	Leírás
	VESZÉLYES Nagy kockázatú közvetlen veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos testi sértéshez vezet, ha nem kerüljük el.
	FIGYELMEZTETÉS Közepes kockázatú lehetséges veszélyt jelez, amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem kerüljük el.
	VIGYÁZAT Alacsony kockázatú veszélyt jelez, amely, ha nem kerüljük el, kisebb vagy közepes mértékű sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
MEGJEGYZÉS	A megjegyzések segítenek abban, hogy elkerüljük a készülék károsodását.
IVRA	Intravénás regionális anesztézia
EMC	Elektromágneses kompatibilitás
	Műveleti utasítás: A felhasználó felszólítása, hogy tegyen valamit.

2. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE

A Tourniquet Touch TT20 egy elektromos működtetésű vértelenítő készülék. Szabályozza az vértelenítő mandzsetta nyomását, amely átmenetileg elzárja a beteg felső vagy alsó végtagjának véráramlását a vérmentes végtag fenntartása érdekében.

A Tourniquet Touch TT20 alkalmas egy, két (bilaterális műtét) vagy dupla mandzsettával (IVRA) történő használatra.

Klinikai előny: Vértelen műtét végtag létrehozása végtagműtétek során a vérvesztés minimalizálása és az érrendszeri struktúrák láthatóvá tételének és azonosításának megkönnyítése érdekében.

Betegek célcsoportja: A felső vagy alsó végtagokon sebészeti beavatkozást igénylő betegek. Felhasználási hely: Orvosi célra alkalmas helyiségek.

3. JAVALLAT / ELLENJAVALLAT

A javallatok és ellenjavallatok az alkalmazástól és így a kiválasztott vértelenítő mandzsettától függenek.

Az vértelenítés lehetséges indikációi:

- Bizonyos törések helyreállítása
- Térd, kéz, ujj vagy könyök artroszkópiája
- Csontbeültetés
- Kirschner huzal eltávolítása
- Traumás vagy nem traumás amputáció
- Daganatok vagy ciszták eltávolítása
- Bőr alatti fasciotómia
- Idegkárosodás
- Szalag műtétek
- Térdízület, csuklóizület vagy ujjizület pótlása vagy felülvizsgálata
- Hammertoe korrekció
- Láb ortopédia

További javallatok nem ismertek.

Az vértelenítés lehetséges ellenjavallatai:

- Nyílt végtagtörések
- Poszt-traumás, tartós kézrekonstrukciók
- Súlyos zúzódásos sérülések
- Könyökműtét egyidejűleg fennálló túlzott duzzanattal
- Súlyos magasvérnyomás
- Bőrártulás
- Keringési zavarok (pl. perifériás artériás betegség)
- Diabétesz mellitusz

Egyéb ellenjavallatok nem ismertek.

Egyedi esetekben az orvosnak a használat előtt szakismeretei alapján kell értékelnie a javallatokat és ellenjavallatokat.

4. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A termékeket szemrevételezéssel meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e bennük sérülések (repedések, törések stb.). Sérült termékeket nem szabad használni.
- Ha a környezeti hőmérséklet megváltozott (pl. szállítás), a készüléket nem szabad a táphálózatra csatlakoztatni, amíg el nem éri a szobahőmérsékletet.
- A terméket csak orvos vagy orvos utasítására orvosilag képzett személyzet használhatja.
- A felhasználó és/vagy a beteg köteles jelenteni az eszközzel kapcsolatos minden súlyos eseményt a gyártónak és az EU tagállamának (vagy az adott ország illetékes hatóságának, ha az esemény az EU-n kívül történik) illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy a beteg él.
- A készüléket a gyártó vértelenítő mandzsettáival és spirális csatlakozócsöveivel való használatra tervezték és tesztelték. Ha a felhasználó más gyártók vértelenítő mandzsettáit és spirális csatlakozócsöveit használja, a gyártó nem vállal felelősséget az eszközért.
- A készülék üzembe helyezése előtt minden alkalommal el kell végezni a funkcióellenőrzést.
- Ha problémák merülnek fel, indítsa újra a készüléket. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
- Védje a készüléket a fröccsenő víztől és nedvességtől. Ne működtesse a készüléket, ha folyadék került bele.
- A készülék nem MRI-kompatibilis.
- A készülék nem steril.
- A készülék nem defibrillátor-védett.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózatról való leválasztás gyorsan elvégezhető legyen.
- A készülékben lévő újratölthető akkumulátor áthidalja a hálózati áramellátás rövid megszakadásait.
- A készülék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Ha az akkumulátor sérülésének gyanúja merül fel, ne használja a készüléket. A sérülés az akkumulátor meggyulladását okozhatja, ha a készülék még mindig be van dugva vagy használatban van. Lépjön kapcsolatba a gyártóval.
- Robbanásveszély miatt a készüléket nem szabad gyúlékony érzéstelenítő gázok közvetlen közelében (távolság < 25 cm) vagy > 25 % oxigénkoncentráció mellett használni.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket összeszerelés, tisztítás és tárolás előtt le kell választani a hálózatról.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket csak védőföldeléssel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni.
- Az egységen semmilyen módosítás nem végezhető.
- A jelen útmutatóban nem leírt további javításokat csak a gyártó végezheti el.

EMC zavarok

- A Tourniquet Touch telepítésekor figyelembe kell venni az EMC követelményeket (EMC = elektromágneses kompatibilitás). A Tourniquet Touch megfelel az IEC 60601-1-2 EMC-követelményeinek. A Tourniquet Touch közelében olyan berendezések is használhatók, amelyeknek a használat során nem kell megfelelniük ezeknek az EMC-követelményeknek, és ezért zavarhatják a Tourniquet Touch készüléket.
- Ha a Tourniquet Touch egy HF sebészeti egység (HF = magas frekvencia) vagy egy HF árnyékolt szoba közelében található, a Tourniquet Touch-on működési zavarok léphetnek fel. Más HF-sebészeti egységekkel való interferencia esetén a következőképpen járjon el:
 1. Növelje a távolságot a Tourniquet Touch és a HF sebészeti berendezések között, beleértve a vezetékeket is.
 2. A monopoláris elektróda és a HF-sebészeti egység semleges elektródájának vezetékait párhuzamosan és egymáshoz közel kell lefektetni a betegig.
 3. Ellenkező esetben forduljon a HF-sebészeti egységek gyártóihoz.
- A házon belüli áramellátó hálózat miatt esetleges fellépő zavarok esetén a leválasztást szakképzett szakemberek segítségével kell elvégezni, pl.:
 - Külön ellátóhálózat a Tourniquet Touch és a többi eszköz számára
 - A tápegység csillag alakú bekötése
 - Több egység referenciapotenciáljának, valamint a védőföldelő vezetéknek vagy a földelési rendszernek a csillag alakú kombinációja.
 - Nincs közös visszatérő vezeték (például PEN-vezető)

5. SZÁLLÍTÁSI TELJESSÉG

	Tourniquet Touch TT20
	Spirális csatlakozótömlő kék, 3,0 m hosszúságban, kinyújtvá
	Spirális csatlakozótömlő piros, 3,0 m hosszúságban, kinyújtvá
	2 Tömítő dugó szívárgásvizsgálathoz
	Hálózati csatlakozó Európa (minden ország, kivéve Nagy-Britannia és Svájc) CEE / XVII 7típus Kábelcímke azonosító: 6051.2183
	Hálózati csatlakozó Nagy-Britannia BS 1363 típus Kábelcímke azonosító: 6051.2188
	Hálózati csatlakozó Svájc 12 SEV típus Kábelcímke azonosító: 6051.2185
	Hálózati csatlakozó Ausztrália AS 3112 típus Kábelcímke azonosító: 6051.2190
	Hálózati csatlakozó Kína GB típus 2099 Kábelcímke azonosító: 3-100-527
	Hálózati csatlakozó Japán típus JIS 8303 Kábelcímke azonosító: 6051.2191
	Hálózati csatlakozó Észak-Amerika típusa NEMA 5-15 Kábelcímke azonosító: 6051.2181

Az országtól függően a megfelelő hálózati kábelt mellékeljük. Csak a mellékelt hálózati kábelt használja. Más hálózati kábeleket nem szabad használni.

Hálózati kábel

A mellékelt hálózati kábel azonosítása a következő jellemzőkkel lehetséges:

<ul style="list-style-type: none"> V-Lock IEC csatlakozó Európa, Nagy-Britannia, Svájc, Ausztrália, Kína és Japán számára 	<ul style="list-style-type: none"> V-Lock csatlakozó nem fűtőkészülékek számára Észak-Amerikában 
<ul style="list-style-type: none"> Kábelcímke azonosító 	

6. TERMÉKLEÍRÁS



- ① Kijelző érintőképernyő funkcióval
- ② Optikai riasztás
- ③ Be/Ki gomb
- ④ Hangszóró a riasztási hanghoz
- ⑤ Kék csőcsatlakozó - 1. vértelenítő csatorna
- ⑥ Kövesse a kezelési utasításokat
- ⑦ piros csőcsatlakozó - 2. vértelenítő csatorna



- ⑧ Fogantyú
- ⑨ USB-csatlakozás
- ⑩ Egyenpotenciál csatlakozója
- ⑪ A V-Lock elektromos hálózati csatlakozó nem fűtőkészülékek számára
- ⑫ Típus tábla



VIGYÁZAT

- A gyártó megtiltja a hálózati telepítést az USB-porton.
- Az USB-port csak szerviz célokra szolgál.

Fogantyú

A készüléket csak a mellékelt fogantyúnál fogva szabad szállítani.

Alternatív megoldásként tolja a készüléket az állvány fogantyújánál fogva, amikor az állványra van szerelve.

Akkumulátor-kezelés

A készülék Li-ion akkumulátorral van felszerelve, amelynek töltési folyamatát egy akkumulátor-kezelő rendszer vezérli.


A töltési folyamatot a hőmérséklet és a töltöttségi állapot függvényében vezérli a készülék az akkumulátor élettartamának növelése érdekében. A töltési idő ezért nagymértékben változhat.


Az akkumulátort a készülék tartalékrendszereként tervezték. Hálózatkimaradás esetén a készülék minden funkciója elérhető. A készüléket általában hálózati tápegységgel kell üzemeltetni.


Az akkumulátor hosszú élettartamának biztosítása és az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében a következőket kell betartani:


- Tartsa be a tárolási és üzemeltetési feltételeket (lásd a "7. A készülék műszaki adatai / Műszaki adatok" című fejezetet).
- Ha a készüléket nem használják, és nem csatlakoztatták a hálózatra, minimum 5 havonta fel kell tölteni. Ez megakadályozza az akkumulátor mélykisülését. Ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

Az akkumulátor töltése

Ha a készüléket a hálózatra csatlakoztatták, a  billentyűvel érzéklni lehet a készülék akkumulátorának töltöttségét. A készüléket általában a táphálózatról kell működtetni.

A  gomb folyamatosan világít:
A készülék üzemkészs és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik.

A  gomb megérintésekor ötször egymás után villog:
A készülék nem üzemkészs, és az akkumulátor töltöttsége nem elegendő. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A töltési folyamat néhány perctől akár egy óráig is eltarthat.

A  gomb nem világít:
A készülék nincs üzemkészs állapotban, és az akkumulátor mélyen lemerült. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A töltési folyamat több órát is igénybe vehet.

7. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ, TECHNIKAI ADATOK

Súly:	4,5 kg (tartozékok nélkül)
Méreték:	Magasság 186 mm Szélesség 263 mm Mélyesség 226 mm
Szoftver verzió:	1.0
Hálózati feszültség:	100 - VAC
Hálózati frekvencia:	50 - 60 Hz
Energiafogyasztás:	130 VA
Hálózati biztosíték:	2x Littelfuse 215 sorozat: T2.5 AH, V250
Akkumulátor típusa:	Lítium-ion (14,4 V - 93,6 Wh)
Akkumulátoros tartalék üzemidő:	Kb. 8 óra teljesen feltöltött, újszerű állapotú akkumulátor esetén, normál működés mellett, nem szivárgó vértelenítő mandzetta használatát feltételezve.
Az akkumulátor töltési ideje:	Kb. 3 óra 20 °C-os környezeti hőmérsékleten.
Védelmi osztály (IEC 60601-1):	1 (B típusú funkcionálisan érinthető részekkel *) * A készülék IEC 60601-1. szerinti besorolása a funkcionálisan érinthető részek tekintetében B típusú. Minden, a funkcionálisan érinthető részekkel szembeni követelmény (pl. a szivárgó áramok elleni szigetelés) a készüléken belül van megvalósítva.
Üzemi nyomás:	100kPa
Nyomástartomány:	80 - 500 Hgmm között állítható 5 Hgmm lépésekben
Nyomásszabályozás:	0 / +5 Hgmm (a beállított értéktől)
A kijelző pontossága:	±5 Hgmm
Riasztási idő:	15 - 120 perc között állítható 5 perces lépésekben (hangjelzés és vizuális)
Nyomásriasztás: Hangjelzés és vizuális riasztás hangereje:	60 - 88 dB (A) 1 m távolságban
Olyan eszközfelületek, amelyeket a felhasználó valószínűleg megérint:	Burkolat t < 1 perc Tmax = 55 °C Kijelző (üveg) t < 10 másodperc Tmax = 52 °C
Csatlakozás:	Kék / piros spirális csatlakozótömlő gyorscsatlakozóval
Megjelenítés:	8" WVGA (800 x 480 képpont) TFT LED háttérvilágítással
Érintőképernyő:	kapacitív, reagál az érintésre
Szállítási feltételek:	Hőmérséklet: -20 és +60 °C között Páratartalom: 5 - 95 % relatív páratartalom kondenzáció nélkül
Tárolási és üzemeltetési feltételek:	Környezeti nyomás: 70 - 106 kPa Hőmérséklet: +10 és +35 °C között Páratartalom: 30 - 95 % relatív páratartalom kondenzáció nélkül Környezeti nyomás: 70 - 106 kPa
A nyomásegységek átváltása:	1 hPa = 1,01973 cmH ₂ O = 0,75006 Hgmm

8. GÖRÜLŐ ÁLLVÁNY

A gyártótól opcionálisan kapható kosaras állvány.



VIGYÁZAT

- Annak érdekében, hogy az állvány szállítás közben ne csússzon vagy billenjen el, be kell tartani a 004-01-0336 - Mobil állvány használati utasítás "Szállítási feltételek" című fejezetét.
- Az alábbi utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A Tourniquet Touch egységgel felszerelt állvány csak a következő feltételek mellett szállítható:




- A hálózati kábelt tekerjük fel a készülék tartólemezeinek erre a célra kialakított hátsó részére.
- A kosár terhelésének egyenletesen kell eloszlania.
- A kosarakat nem szabad a perem fölé tölteni.
- A Tourniquet Touch készülék spirál összekötőcsöveit helyezzük a tartólemez két oldalsó csőtartó vájatába.
- Csak az állvány fogantyújánál fogva tolja a készüléket.
- Az állvány rögzítéséhez az összes görgőt rögzíteni kell. Ha nem minden görgő van rögzítve, az állvány akaratlanul elmozdulhat.

9. KEZELŐGOMBOK ÉS SZIMBÓLUMOK





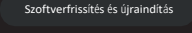







Kezelőgombok

A gombok színei az alkalmazástól vagy a mandzsettacsatornától függően változnak. Ez nem változtatja meg a gombok funkcióját.














	Be/Ki gomb
	Riasztási hang megszakítása
	IVRA mód
	Beállítások
	A mandzsetta felfújására szolgáló gomb
	Csúszka: A mandzsetta leeresztéséhez toljuk el balra a gombot 2 másodpercen belül.
	Előzmények
	Ablak bezárása
	Kiválasztás gomb fel
	Kiválasztás gomb lefelé
	Kiválasztás gomb balra
	Kiválasztás gomb jobbra
	Érték növelése / csökkentése
	Rögzített értékek kiválasztása (az értékek változhatnak)
	A nyomás és a riasztási idő előbeállítás
	Hangerő és riasztási hang
	Fényerő
	Kalibrálás
	Dátum / Időpont
	Adatcsere
	Rendszerellenőrzés
	Nyelv
	Csökkentse/növelje a hangerőt
	Riasztási hang beállítása
	A fényerő csökkentése/növelése
	Megerősítés
	Bezárás
	Naplófájl mentése USB-re

	A szoftverfrissítés telepítése és a készülék újraindítása
	Kalibrálás A nyomás növelése / csökkentése 50 Hgmm-rel
	Önellenőrzés vagy szívárgásvizsgálat elvégzése

Az állapotjelzések szimbólumai

	Hálózati tápellátás be van kapcsolva
	Hálózati ellátás megszakadt
	Az akkumulátor töltöttsége 80 - 100 %
	Az akkumulátor töltöttsége 60 - 80 %
	Az akkumulátor töltöttsége 40 - 60 %
	Az akkumulátor töltöttsége 20 - 40 %
	Az akkumulátor töltöttsége 10 - 20 %
	Az akkumulátor töltöttsége 0 - 10 %
	Nincs akkumulátor / akkumulátor hibás
	IVRA üzemmód kikapcsolva
	IVRA üzemmód aktíválva
	A riasztási hang megszakítása aktíválva van

További szimbólumok

	Önellenőrzés
	A kézi önellenőrzés sikeresen befejeződött
	Figyelmeztetés
	Felhasználó az utolsó mandzsettarész leeresztésére (IVRA)
	Riasztási idő
	Naplófájl
	USB
	USB-n tárolva
	Nincs USB csatlakoztatva
	USB hiba
	USB memória megtelt
	Tourniquet Touch
	A Tourniquet Touch tápellátása megszakítva

10. A FŐ KÉPERNYŐ




A fő kijelző állapotjelző ① sávra, vezérlő ② sávra, csatornasávra ③, a nyomáskijelző ablak ④, a riasztási idő ⑤ vezérlőpanelére és a felfújás / leeresztés sávra ⑥ oszlik.

Az 1-es és a 2-es mandzsettcatorna működése azonos. Minden mandzsettcatornához külön sűrített levegőkör tartozik. Mindkét mandzsettcatorna egymástól függetlenül működtethető.

① Állapotsáv

Ez a sáv tájékoztat a készülék állapotáról. Nincs lehetőség beállításra.

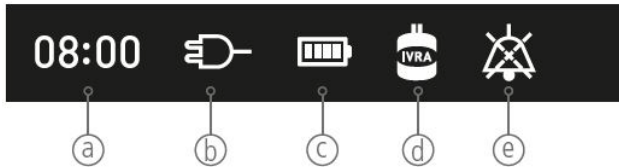

① Idő:	A mező az aktuális időt mutatja.
② Elektromos hálózat:	A mező a hálózati tápellátás állapotát mutatja. A hálózat csatlakoztatva A hálózat megszakítva
③ Az akkumulátor állapota:	A mező az akkumulátor állapotát mutatja. Az akkumulátor töltöttsége 80 - 100 % Az akkumulátor töltöttsége 60 - 80 % Az akkumulátor töltöttsége 40 - 60 % Az akkumulátor töltöttsége 20 - 40 % Az akkumulátor töltöttsége 10 - 20 % Az akkumulátor töltöttsége 0 - 10 % Nincs akkumulátor vagy hibás
④ IVRA mód:	A mező az IVRA állapotát mutatja. Az IVRA mód aktíválva van Az IVRA md nincs aktíválva
⑤ Hangjelzés szünetelése (Alarm):	Ez a mező a hangjelzés szüneteltetését mutatja. 30 másodpercig látjuk, ha a gombot megnyomtuk hangjelzés közben. Az optikai jelzés aktív marad.

② Vezérlősáv

Ez a sáv a funkciókat aktiváló és deaktiváló, illetve a beállítási ablakot megnyitó gombokat tartalmazza.



①	A gomb megnyomása 30 másodpercre megszakítja a riasztás hangját. A gomb csak akkor jelenik meg a vezérlősávban, ha riasztás van jelen.
② IVRA:	A gomb aktiválja vagy deaktiválja az IVRA üzemmódot. Ez a gomb láthatatlan, amikor a vértelenítő mandzsetta fel van fújva.
③ Beállítások:	Ez a gomb egy beállító ablakot nyit meg. A gomb láthatatlan, amikor a vértelenítő mandzsetta fel van fújva.


③ Csatorna sáv

Ez a sáv olyan gombokat tartalmaz, amelyek megnyitnak vagy bezárnak egy ablakot. Ez a sáv a meglévő hibaüzeneteket is megjeleníti (lásd a "14. Riasztások" és a "15. Hibaelhárítás" című fejezetet). A megfelelő gombot a folyamat során elrejtjük. Nincs lehetőség beállításra.



① Előzmények:	A gomb megnyitja az Előzmények ablakot. Ez a gomb nem látszik a csatorna sávban, amikor egy vértelenítő mandzsetta fel van fújva.
---------------	---

Nyomjuk meg a gombot az előzmények megjelenítéséhez.

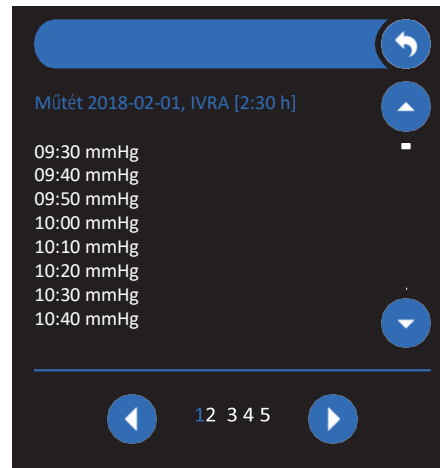


Az ablak megnyílik. Az előzmények között tárolja az adott mandzsettcatorna legutóbbi 5 ciklusának adatait.


- ▶ Használjuk a két / gombot a műtéti ciklus kiválasztásához.
- ▶ A cikluson belül a és gombokkal végignézhethetjük az adatokat.
- ▶ Az ablak bezárásához a gombot használjuk.

④ Nyomáskijelző ablak

A kezelőpanelen a beállított nyomás a használat előtt és közben is beállítható.

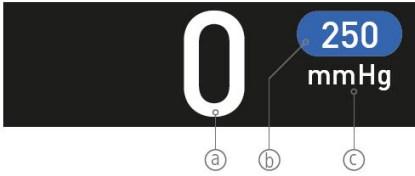

- Ⓐ Tényleges nyomás: Tényleges nyomás (szabályozási pontosság +5 Hgmm)
 - Ⓑ Beállított nyomás: előre beállított nyomás
 - Ⓒ Egység: Hgmm
- ▶ Válassza ki a vezérlőpanel.

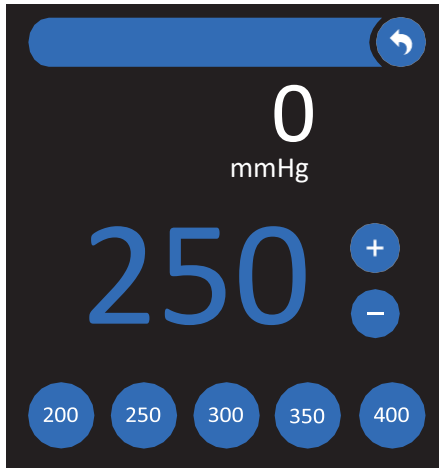

Az ablak megnyílik.

- ▶ Válasszon ki egy gyorsbillentyűt az alsó sorban.
 - ▶ Ha szükséges, növelje a beállított nyomást 5 Hgmm lépésekben a **+** gombbal, vagy csökkentse a **-** gombbal.
- A beállított érték azonnal érvényesül.
Ha nem történik további bevitel, a kezelőpanel 3 másodperc múlva automatikusan bezáródik.
- ▶ Másik lehetőségként zárja be a vezérlőpanel a **↶** gombbal.

MEGJEGYZÉS


Ha a vezérlőpanel megnyitása után nem történt változás, az ablak 5 másodperc múlva automatikusan bezáródik.

⑤ Vezérlőpanel a riasztási időhöz

A vezérlőpanelen a riasztási idő a használat előtt és közben is beállítható.



- Ⓐ Időzítő: Az eltelt műtéti időt mutatja
 - Ⓑ Riasztási idő: A műtét tervezett ideje
 - Ⓒ Egység: óra:perc
- ▶ Válassza ki a vezérlőpanel.

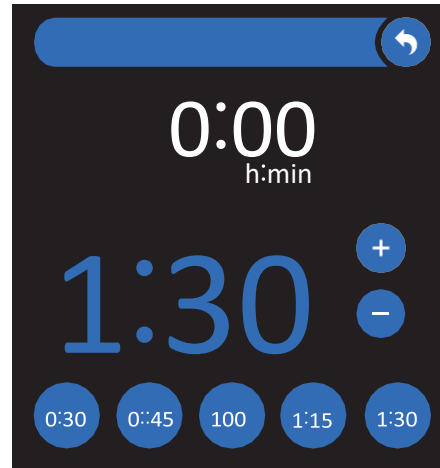

Az ablak megnyílik.

- ▶ Válasszon ki egy gyorsbillentyűt az alsó sorban.
 - ▶ Ha szükséges, növelje a riasztási idejét 5 perces lépésekben a **+** gombbal, vagy csökkentse a **-** gombbal.
- A beállított érték azonnal érvényesül.
Ha nem történik további bevitel, a kezelőpanel 3 másodperc múlva automatikusan bezáródik.
- ▶ Alternatív megoldásként zárja be a vezérlőpanel a **↶** gombbal.

MEGJEGYZÉS


Ha a vezérlőpanel megnyitása után nem történt változás, az ablak 5 másodperc múlva automatikusan bezáródik.

⑥ Felfújás / leeresztés sáv

Ebben az ablakban a mandzsetta felfújását és leeresztését végezhetjük el.




- Ⓐ Felfújó gomb: Felfújja a vértelenítő mandzsettát.

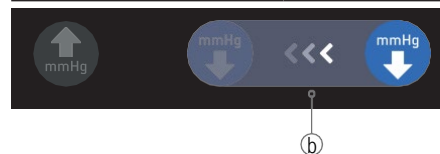




- Ⓑ Csúszka a leeresztéshez: Leereszti a levegőt a vértelenítő mandzsettából. Húzzuk el a csúszkát teljesen balra 2 másodpercen belül a **mmHg** gomb használatával.

10.1 BEÁLLÍTÁSOK

- ▶ Nyissa meg a beállítások ablakát a  billentyűvel.

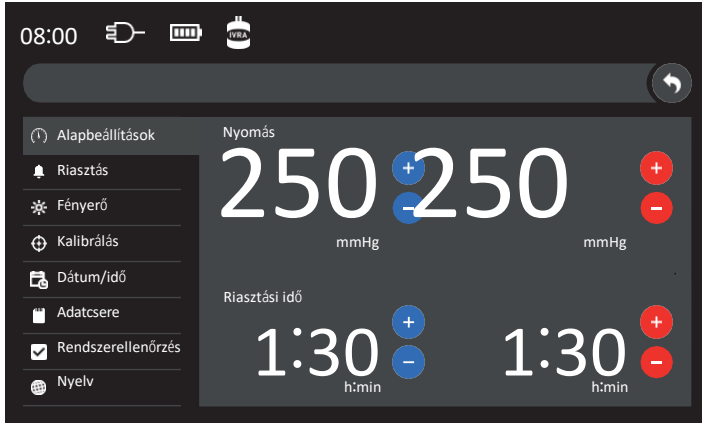
A nyomás és a riasztási idő alapértelmezéseinek beállítása



- ▶ Növelje az értékeket a  billentyűvel, vagy csökkentse a  billentyűvel. A beállított értékek a készülék újraindítása után jutnak érvényre.

	Beállítási tartomány
Nyomás	150 - 400 Hgmm 5 Hgmm lépésekben
Riasztási idő	0:15 - 1:30 (óra:perc) 5 perces lépésekben

A hangerő beállítása és a jelzhang kiválasztása

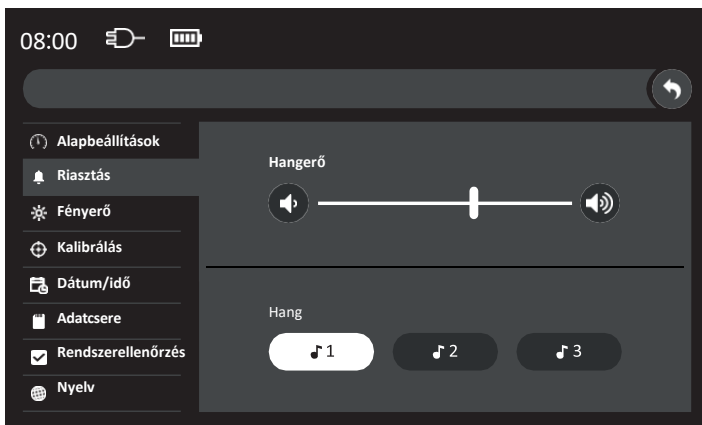

FIGYELMEZTETÉS


- A jelzés hangerejét a környezet figyelembevételével állítsuk be.
- A hangjelzésnek tisztán hallhatóknak kell lennie a teremben.
- A jelzés hangjának különböznie kell más használt eszközök hangjelzéseitől.
- A hangjelzés adó hangszóró a készülék bekapcsolásakor automatikusan ellenőrzésre kerül.

- ▶ Válassza ki a "Riasztás" menüpontot a kezelőpanelen.

- ▶ Állítsa be a hangerőt a  /  gombokkal és/vagy a csúszkával.


- ▶ A hang megváltoztatásához a  /  /  gombok megnyomásával választhat.

Fényerő

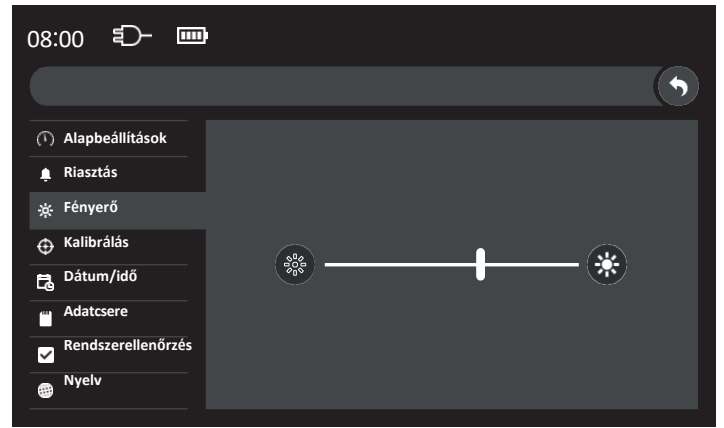

- ▶ Válassza ki a "Fényerő" menüpontot a kezelőpanelen.

- ▶ Állítsa be a fényerőt a  /  gombokkal vagy a csúszkával.

- ▶ Zárja be az ablakot a  gombbal.

A "Kalibrálás", "Dátum/idő", "Adatcsere", "Rendszerellenőrzés" és "Nyelv" vezérlőpanelek a "17. Karbantartás" fejezetben található.

11. ÜZEMBE HELYEZÉS



- A készüléket általában a hálózatról kell üzemeltetni. A hálózati csatlakozónak védőföldeléssel kell rendelkeznie.
- A potenciálkiegyenlítő biztosítja, hogy az egyidejűleg megérintható különböző fémfelületek között ne léphessen fel feszültségkülönbség, amely az emberi test, az orvosi műszerek- és más vezetőképes tárgyak között egyébként kialakulhatna.
- ▶ Kössük össze a DIN 42801 szerinti potenciálkiegyenlítő (POAG) csatlakozóját ②

a műtő POAG csatlakozójával egy POAG összekötő kábel segítségével.

- ▶ Ha az orvosi elektromos rendszer installációját az operátor végzi, akkor azt az IEC 60601-1, 16. fejezet, "ME systems" részben leírtak szerint kell elvégeznie.
- ▶ Helyezzük a hálózati kábel csatlakozóját a ②, aljzatba, másik felét dugjuk be a konnektorba.


VIGYÁZAT
Az öntesztet mandzsetták nélkül kell elvégezni.

- ▶ Kapcsolja be a készüléket a gomb segítségével úgy, hogy addig tartsa megérintve, amíg a készülék elindul.
- ▶ Az önteszt ideje alatt ne érintsük meg a képernyőt.



A készülék a bekapcsolás után ellenőrzi a látható ③ és hallható ④ jelzőrendszert.

VIGYÁZAT
Ha az önteszt alatt jelzéseket nem szűnnek meg, akkor indítsuk újra a készüléket. Ha továbbra is fennáll a hiba, akkor jelezzük a hibát a gyártónak.

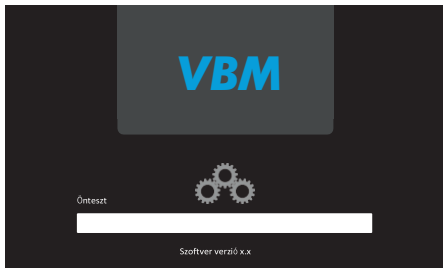


A készülék bekapcsoláskor automatikusan elvégzi az önellenőrzést. Ez körülbelül 30 másodpercig tart.

Az önellenőrzés során a következő funkciókat ellenőrzi:

- Belső biztonsági jellemzők
- Feszültségek és a készülék hőmérséklete
- Elsődleges és másodlagos sűrített levegőellátás az 1. és 2. mandzsettacsatornához
- Minden adattároló eszköz
- Akkumulátor
- Szoftver és hardver verzió
- Minden hallható riszto rendszer

VIGYÁZAT
Folyamatos működés esetén a készüléket legalább naponta egyszer újra kell indítani, hogy a készülék működése és biztonsága biztosított legyen.

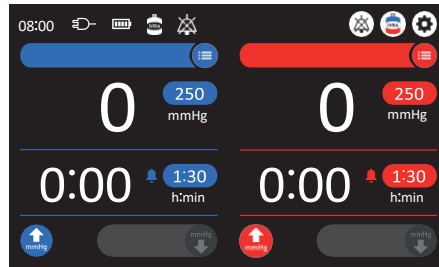

- ▶ Ha az önellenőrzés sikeres, akkor megjelenik a fő képernyő a kijelzőn.
- ▶ Ha hibáüzenetek jelennek meg, javítsa ki a hibákat a "15. Hibaelhárítás" című fejezet szerint.
- ▶ Minden használat előtt végezze el a funkcióellenőrzést (lásd a "12. A működőképesség ellenőrzése" című fejezetet).


12. A MŰKÖDŐKÉPESÉG ELLENŐRZÉSE



VIGYÁZAT

- Tilos sérült mandzsettát és összekötő csövet használatba venni.
- Az összekötő csövet és a mandzsetták csövet nem szabad megtörni.
- Mindig a végtag méretének megfelelő nagyságú mandzsettát alkalmazzunk.
- A mandzsettát csak egy összekötő csővel szabad csatlakoztatni, az összekötő csatlakozóknak határozottan kell illeszkedniük egymásba.

- ▶ Csatlakoztassuk az összekötő csövet a vizsgálandó csatornához, ügyelve a színekre.
- ▶ Vegyük elő a műtéthez kiválasztott mandzsettát.
- ▶ Szorosan tekerje fel a mandzsettát, hogy felfújáskor ellennyomás tudjon kialakulni.
- ▶ A mandzsetta csövet csatlakoztassuk az összekötő csőhöz a színekódokat figyelembe véve.
- ▶ Bilaterális sebészet esetén a másik szimpla mandzsettát csatlakoztassuk a készülék második csatornához.
- ▶ Fűjük fel a mandzsettát a gomb segítségével. A teljes rendszernek szivárgásmentesnek kell lennie.
- ▶ Ha hibajelzést kapunk, akkor az ellenőrzést végezzük el egy másik mandzsettával.
- ▶ A jelzőrendszer ellenőrzése érdekében válasszuk le az ellenőrizendő csatornáról a mandzsettát.

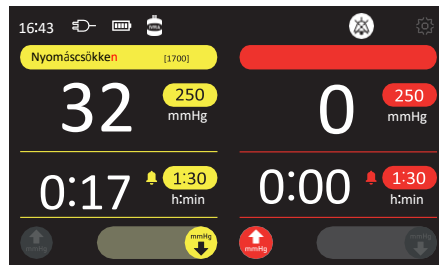

A hiba megjelenik a csatornasávban. Az ellenőrizendő mandzsettacsatorna a csatorna színe és a sárga között változik.

A fő képernyő bal oldalán megjelenik az optikai vészjelzés és a hangjelzés is megszólal.

- ▶ Csatlakoztassuk újra a mandzsettát az összekötő csőhöz.

Eresszük le a mandzsettát a csúszkával.

VIGYÁZAT
Ha a készülék az ellenőrzés során hibának bizonyul, indítsuk újra a készüléket és ismételjük meg a tesztet. Ha a hiba újra megjelenik, akkor értesítsük a gyártót. Amíg a hibát ki nem javítottuk, nem szabad a készüléket használni.

13. HASZNÁLAT



VIGYÁZAT

- A készülék minden egyes használata előtt el kell végezni a teljes rendszer működési ellenőrzését (lásd a "12. Funkcióellenőrzés" című fejezetet).
- Ha problémák merülnek fel, indítsa újra a készüléket. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
- A felhasználónak legfeljebb 3 m távolságban kell lennie, és a kijelzőt nem takarhatják el más tárgyak.
- Ami a vértelenség időtartamát illeti, követni kell az orvosszakma e területen kialakított tudományos gyakorlatát. A vértelen állapot nem lehet több 2 óránál.
- A pneumatikus vértelenítő használata növelheti a posztoperatív distalis mélyvénás trombózis kockázatát a teljes térdprotézis után. A döntés, hogy ebben az eljárásban pneumatikus vértelenítőt használunk-e, a sebész felelőssége.
- Azért, hogy úgy tudjuk biztosítani a végtag vértelenségét, hogy az a páciens számára minél kisebb terhelést jelentsen, a beállítandó nyomásértéket a mandzsetta mérete, a végtag mérete és a szisztolés vérnyomás alapján kell megállapítani.
- A felhasználónak rendszeres időközönként ellenőriznie kell a mandzsetta nyomását. Ha a tényleges nyomás eltérne a kívánatos értéktől, akkor közbe kell avatkozni.
- Használja a végtagnak megfelelő mandzsettaméretet.
- A magas prioritású riasztások okát a lehető leghamarabb meg kell szüntetni (lásd a "14. Riasztások" című fejezetet).

A készülék rendszerhibája esetén a nyomás a vértelenítő mandzsettában megmarad.

MEGJEGYZÉS

A gyártótól különböző vértelenítő mandzsetták (lásd a "22. Cikkszámok" című fejezetet) szerezhetőek be a következő alkalmazásokhoz. A használati utasítást (G1033 - Tourniquet mandzsetta egyszerű használatra, G1046 - Tourniquet mandzsetta újrahaználható vagy 004-01-0349 - Tourniquet Wipe mandzsetta) kell követni, különösen a használatra, újrafeldolgozásra és megsemmisítésre vonatkozó fejezeteket.

13.1 HASZNÁLAT SZIMPLA MANDZSETTÁVAL

- A használható eszközök táblázatos formában megtalálhatók a "22. Cikkszámok" fejezetben "Használható eszközök" oszlop, "13.1. Használat szimpla mandzsettával").
- Helyezzük fel a szimpla mandzsettát a végtagra.

A gyártó javasolja, hogy használjunk alapárnázást a szimpla mandzsettához.

- Csatlakoztassuk a mandzsettát az összekötő csőhöz ügyelve a színek kódokra. Ha szükséges, akkor állítsunk a nyomás és a jelzési idő alapértékére a megfelelő ablakokban.


- A már felhelyezett mandzsetta alatt szorítsuk ki a vért a végtagból.

- Fújuk fel a mandzsettát a gomb segítségével.

A képernyőn megjelenik a tényleges nyomás, melyet a képernyőn szükség esetén módosítani tudunk.

- Ezzel elkezdődik a műtéti ciklus, amely alatt a tényleges nyomásértéket időközönként ellenőrizni kell.

Az eltelt és az előre beállított idő értékét az időablak folyamatosan mutatja.

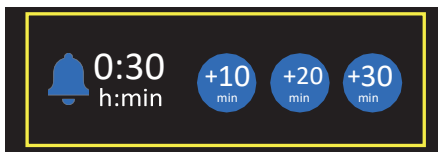

MEGJEGYZÉS

Ha az előre beállított műtéti idő letelt, a készülék hangjelzést és fényjelzést ad és megjelenik egy felugró ablak sárga kerettel. A műtéti idő módosítható a felugó ablakban.

- A műtét végén a csúszka segítségével teljesen eresszük le a mandzsettát.
- Haladéktalanul vegyük le a mandzsettát és az alapárnázást a végtagról, hogy elkerüljük a vénás pangás kockázatát.
- Válasszuk le a mandzsettát az összekötő csőről.
- Ha kell, kapcsoljuk ki a készüléket a bekapcsoló gombbal úgy, hogy addig tartjuk azt érintve, míg a képernyő elsötétedik. Szükség esetén húzzuk ki a hálózati csatlakozó kábelt is.
- A gyártó javasolja, hogy minden használat után fertőtlenítsük a készüléket a kontamináció veszélyét csökkentendő. "19. Fertőtlenítés törléssel").

13.2 HASZNÁLAT KÉT SZIMPLA MANDZSETTÁVAL BILATERÁLIS SEBÉSZET ESETÉN

- A használható eszközök táblázatos formában megtalálhatók a "22. Cikkszámok" fejezetben "Használható eszközök" oszlop, "13.2. Használat két szimpla mandzsettával bilaterális sebészet esetén").

Az eljárás megegyezik a "13.1. Használat szimpla mandzsettával" pontban leírtakkal, kivéve az alábbi lépéseket:

- A második csatornát másik végtaghoz használjuk.
- Ha mindkét mandzsettát felfújtuk, akkor a pillanatnyi nyomás és idő adatok a külön-külön láthatók az egyes csatornák ablakaiban.



FIGYELMEZTETÉS

Ha a műtét az egyik végtagnál befejeződött akkor azt a mandzsettát haladéktalanul le kell eresztetni. Ha véletlenül nem a megfelelő csatornát eresztjük le, annak a végtag vérzése lesz a következménye.

13.3 HASZNÁLAT DUPLA MANDZSETTÁVAL (IVRA)

Az eljárás megegyezik a "13.1. Használat szimpla mandzsettával" pontban leírtakkal, kivéve az alábbi lépéseket:



VIGYÁZAT

- IVRA alkalmazásakor álljon rendelkezésre egy alternatív mód és eszközei arra az esetre, ha valami hiba történne a készülékkel vagy tartozékaival, hogy haladéktalanul vissza tudjuk állítani a végtag vértelen állapotát.
- Csak dupla mandzsettákat szabad használnunk, melyek táblázatos formában megtalálhatók a "22. Cikkszámok" fejezetben, ("Használható eszközök" oszlop), "13.3. Használat dupla mandzsettával (IVRA)").
- Hogy megakadályozzuk a dupla mandzsetta véletlen teljes leeresztését, aktiválni kell a z IVRA üzemmódot.
- Ha VBM dupla mandzsettákat használunk, akkor ajánlatos a kék részt proximálisan, a pirosat pedig disztálisan felhelyezni. A mandzsettarészeket a megfelelő színű összekötő csövekhez csatlakoztassuk. Ha más gyártó dupla mandzsettáját használnánk, akkor vegyük figyelembe, hogy a színek kódok eltérők lehetnek.

- Aktiválja az IVRA üzemmódot a gombbal.


Az állapotjelző ablakban a szimbólum jelenik meg.

- A dupla mandzsettákat olyan sorrendben fújuk fel, ahogy azt a helyi protokoll előírja.



FIGYELMEZTETÉS

- Az anesztetikum beadása után minimálisan 20 perc vértelenségi állapotot fenn kell tartani, hogy megelőzzük a toxikus reakciót.
- Ha a felfújt mandzsettarész elvesztené a nyomását az anesztetikum hatásának kialakulása közben, akkor haladéktalanul fel kell fújnia másik mandzsettarészt.

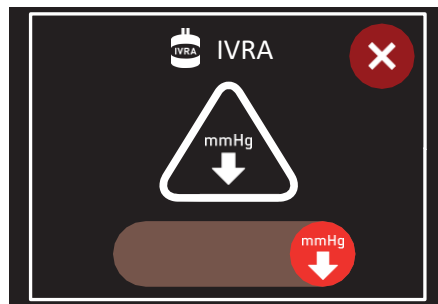

Az utoljára felfújt mandzsettarész leeresztése után az itt látható felbukkanó ablak nyílik meg a képernyőn. Ez a járulékos megerősítő ablak abban segít, nehogy véletlenül eresszük le az utolsó mandzsettarészt.

- Ha tényleg le akarjuk eresztetni a mandzsettát, húzzuk a csúszkát teljesen balra 2 másodpercen belül a gomb segítségével.

14. RIASZTÁSOK

Az egység riasztórendszerrel rendelkezik. A riasztásokra a betegek biztonsága érdekében azonnal reagálni kell.

Ha egy riasztás megoldódott, vagy a riasztás alapja már nem létezik, a riasztás automatikusan törlődik. Ha egy másik riasztás van jelen, akkor az azonos vagy a következő magasabb prioritású riasztás jelenik meg.

Az akkumulátort a készülék tartalékrendszereként tervezték. A riasztórendszer hálózati megszakítás esetén továbbra is felügyeli a készülék összes funkcióját. A készüléket általában hálózati tápegységgel kell üzemeltetni.



- ① Csatorna sáv
- ② Vizuális riasztás
- ③ Kijelző érintőképernyő funkcióval
- ④ Hangszóró akusztikus riasztáshoz
- ⑤ A hangjelzés szüneteltetett állapotának kijelzése (Alarm)
- ⑥ Érintőgomb a hangjelzés szüneteltetésére (Alarm)

14.1 A RIASZTÁSOK FAJTÁI ÉS RANGSORA

A riasztó a következő összetevőkből áll:

- Riasztási hang ④
- Optikai riasztás ②
- Csatornasáv **vagy** ① felugró ablak

Ha riasztás van jelen, a riasztás minden összetevője aktív. Ezenkívül a megfelelő hibaüzenet megjelenik a csatornasávban **vagy** a felugró ablakban. A riasztások a riasztás súlyossága és sürgőssége szerint vannak rangsorolva (magas, közepes és alacsony) (lásd a "15. Hibaelhárítás" című fejezetet).

FIGYELMEZTETÉS



- ▶ Állítsa be a riasztást az adott környezeti feltételeknek megfelelően (lásd a "10.1 Beállítások" című fejezetet).
- ▶ Ha a riasztás továbbra sem hallható, a felhasználónak folyamatosan figyelnie kell a riasztást jelző fényeket ② és a képernyőt ③. Csak ekkor lesz észrevehető a riasztás, és csak akkor lehet megfelelő ellenintézkedéseket tenni.










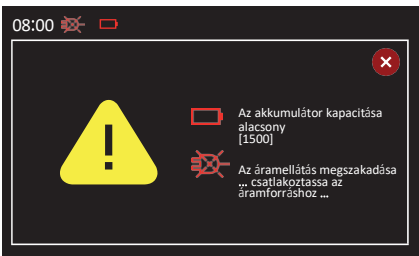

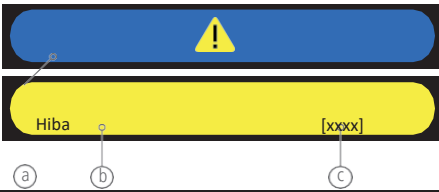
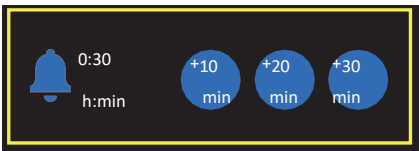


VIGYÁZAT

A magas prioritású riasztások okát a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó a hibajelzéseket az érintőképernyős kijelzőn (a csatornasávban ① vagy a felugró ablakban) és fényjelzés ② révén láthatja. Ezen felül a hangszórón ④ keresztül a hangjelzés is aktiválódik.
- Ha egyszerre több riasztás is bekövetkezik, a riasztási hangok és a vizuális riasztások átfedhetik egymást.

Prioritás	Riasztási hang	Optikai riasztás	Kiegészítő riasztás	
			Csatorna sáv Riasztás egy mandzsettacsatornára vagy mindkét mandzsettacsatornára (globális riasztás)	Felugró ablak (Bemutató kép)
Magas	10 Riasztási hang 3 másodpercenként	 Piros villogó fény	 	
Magas	Riasztási hang másodpercenként	 Folyamatos piros fény	-	-

Prioritás	Riasztási hang	Optikai riasztás	Kiegészítő riasztás	
			Csatorna sáv Riasztás egy mandzsettacsatornára vagy mindkét mandzsettacsatornára (globális riasztás)	Felugró ablak (Bemutató kép)
Közepes	3 Riasztási hang 4 másodpercenként	 Sárga villogó fény		
Alacsony	2 Riasztási hang 16 másodpercenként	 Sárga folyamatos fény		
Egyik sem, az üzenet egy megjegyzés	-	-	-	
További információk	-	-	A csatornasáv másodpercenként változtatja a színét (sárgáról a megfelelő csatorna színére). (a) Hibajelző (b) Hiba leírása (c) Hiba száma	 nyugtázható hiba

A részletes hibaleírást és a hibaelhárítást a "15. Hibaelhárítás" című fejezet ismerteti.


14.2 A BEÁLLÍTOTT IDŐ LETELT (IDŐZÍTETT RIASZTÁS)

Ha a beállított műtéti idő letelt, a készülék hang- és fényjelzést ad, továbbá megjelenik egy felbukkanó ablak sárga kerettel. A korábban beállított műtéti idő meghosszabbítható a felugró ablakban.

14.3 A RIASZTÁSI HANG MEGSZAKÍTÁSA

A "hangjelzés szüneteltetése" érintőgomb csak akkor aktív, ha egy riasztás van folyamatban.

- ▶ Használjuk a  érintőgombot a jelzőhang szüneteltetésére.

A hangjelzés ekkor 30 másodpercre megszakad, az állapotjelző sávban a  szimbólum látható. A fényjelzés, a csatornasáv **vagy** a felugró ablak továbbra is látható marad a kijelzőn. Ha a jelzésre nem reagálunk, akkor a hang 30 másodperc múlva újra megszólal.

- Ha a hangjelzést megszakítottuk és eközben egy másik riasztás aktiválódott, akkor az első jelzés megszakítása után 30 másodperccel kapcsolódik be az új jelzés. Ha újabb, azonos vagy magasabb rangú jelzés kapcsolódik be, akkor az azonnal megszólal.
- Ha több hibajelzés aktív egyszerre, akkor a kijelzőn a legnagyobb prioritású látszik.
- Ha egy magas prioritású hiba jelzése megszűnik, akkor a következő magas rangú hibajelzés lesz látható a képernyőn. Ha időközben minden magas prioritású hiba megszűnik, akkor a következő alacsonyabb rangú riasztás lesz kijelvezve.

15. HIBAELHÁRÍTÁS

15.1 ÖNTESZT

Hibaüzenet	Hiba/meghibásodás	Ok	Hibaelhárítás
0x00000001	Szívárgást észleltek a rendszerben.	Az önteszt az alsó tűréshatáron van.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra az eszközt. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
0x00000008	A maximális nyomás ellenőrzése sikertelen.	A pumpa nem éri el a szükséges nyomást.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra az eszközt. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
0x00400000	Az eszköz belső hőmérséklete a tartományon kívül esik.	Az eszköz belső hőmérséklete > 55 °C vagy < 5 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Állítsa be az eszközt szobahőmérsékletre, és válassza le a táphálózatról. ▶ Csatlakoztassa az eszközt a táphálózathoz, és indítsa újra. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
0x00000400, 0x00001000, 0x00001400	Az eszköz érzékeli, hogy érszorító-/túlnyomásos infúziós mandzsetta van csatlakoztatva.	Érszorító-/túlnyomásos infúziós mandzsetta van az eszközhöz csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Válassza le az eszköztől az érszorító-/túlnyomásos infúziós mandzsettát. ▶ Indítsa újra az eszközt. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
0x00020000	Váratlan belső eszközállapot vagy belső csatlakozási problémák.	Belső időzítési eltérések vagy belső hibák.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra az eszközt. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.


Minden más hibaüzenet esetén forduljon a gyártóhoz.

15.2 HIBÁK A HASZNÁLAT SORÁN






Hibaüzenet (mandzsettcatorna 1 / 2)	Prioritás	Hiba / meghibásodás	Ok	Hibaelhárítás
1000 / 1001, 1020 / 1021	Közepes	Technikai hiba	-	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1300	Magas	A készülék hőmérséklete magas	A készülék hőmérséklete > 65 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leggyorsabban fejezzük be a használatot folyamatosan ellenőrzés mellett. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Hagyja a készüléket lehűlni, és válassza le a hálózati feszültségről. ▶ Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és indítsa újra. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1301	Magas	Technikai hiba	-	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1302 / 1303	Alacsony			
1400 - 1413	Magas			
1500	Közepes	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony	A készülék akkumulátorának töltöttsége túl alacsony. A hátralévő idő kb. 10 p. erc.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
1501	Magas	Az akkumulátor töltöttségi állapota kritikus	A készülék akkumulátorának töltöttsége túl alacsony. A hátralévő idő kb. 2 p. erc.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
1502	Közepes	Akkumulátor hiba	Nincs akkumulátorcsatlakozás.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leggyorsabban fejezzük be a használatot folyamatosan ellenőrzés mellett. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1503	Magas	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas	Az akkumulátor hőmérséklete > 60 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leghamarabb állítsa le az alkalmazást. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1504	Magas	Technikai hiba	-	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1505	Alacsony			
1600 / 1601	Közepes	Az időzítő lejárt	Az időzítő túllépi a riasztási időt, és az alkalmazás több mint 90 percig tart.	Hosszabbítsa meg a riasztási időt, és fejezze be az alkalmazást a lehető leghamarabb.
1602 / 1603	Alacsony	Az időzítő lejárt	Az időzítő túllépi a riasztási időt, és az alkalmazás 90 percnél rövidebb.	Növelje a riasztási idő értékét.
1700 / 1701	Magas	Nyomáscsökkenés	Nyomáscsökkenés >50 Hgmm Szívárgás a spirális csatlakozócsőben, a vértelenítő mandzsettában vagy a csatlakozásokban.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze az összes csatlakozást, és szükség esetén csatlakoztassa. ▶ Ha a nyomáscsökkenés továbbra is fennáll, cserélje ki a spirális csatlakozócsövet vagy a vértelenítőt mandzsettát. ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz. <p>Fontos az IVRA számára</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomáscsökkenés esetén azonnal fújja fel a második mandzsettakamrát, vagy használjon kézi vértelenítőt, vagy használjon valamilyen más megoldást.
1702 / 1703	Magas	Túlnyomás	Legalább 60 másodpercig legalább 15 Hgmm feletti pozitív nyomás állt fenn. Az alkalmazás során a vértelenítő mandzsetta helyzetét megváltoztatták.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a mandzsetta nyomását és a vértelenítő mandzsetta helyzetét. ▶ Figyelje a nyomást. ▶ Ha a nyomás túl magas, cserélje ki a mandzsetta csatornáját, vagy használjon másik készüléket.

1704 / 1705	Közepes	Túlnyomás	15 Hgmm-nél nagyobb túlnyomás állt fenn 6 és 60 másodperc között. Az alkalmazás során a vértelenítő mandzsetta helyzetét megváltoztatták.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a mandzsetta nyomását és a vértelenítő mandzsetta helyzetét. ▶ Figyelje a nyomást.
-------------	---------	-----------	--	---

Hibaüzenet (mandzsettacsatorna1 / 2)	Prioritás	Hiba / meghibásodás	Ok	Hibaelhárítás
1706 / 1707	Magas	Negatív nyomás	Legalább 60 másodpercig legalább 15 Hgmm-nél nagyobb negatív nyomás állt fenn. Az alkalmazás során a vértelenítő mandzsetta helyzetét megváltoztatták.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ellenőrizze a vértelenítő mandzsettát és az összes csatlakozást. ▶ Ha a negatív nyomás továbbra is fennáll, cserélje ki a vértelenítő mandzsettát.
1708 / 1709	Közepes	Negatív nyomás	A negatív nyomás > 15 Hgmm 6-60 másodpercig fennállt. Az alkalmazás során a vértelenítő mandzsetta helyzetét megváltoztatták.	Ellenőrizze a vértelenítő mandzsettát és az összes csatlakozást.
1710 / 1711	Alacsony	Szívárgás (szívárgás)	A készülék aktivitása magasabb a vártnál. A szívárgás nagyobb a vártnál.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fejezze be az alkalmazást normál módon. ▶ Használat után ellenőrizze a vértelenítő mandzsettát és a spirális csatlakozócsövet. ▶ Ezután végezze el a készülék szívárgásvizsgálatát.
1712 / 1713	Alacsony	Nincs vértelenítő mandzsetta	A felfújás során 20 másodpercen belül nem lehetséges a nyomás felépítése.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Csatlakoztassa a vértelenítő mandzsettát a mandzsettacsatornához a spirális csatlakozócső segítségével. ▶ Ellenőrizze az összes csatlakozást, és szükség esetén csatlakoztassa újra. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1714 / 1715	Alacsony	Hiba a leeresztés során	A vértelenítő mandzsetta leeresztésekor a nyomás nem csökken olyan gyorsan, mint ahogyan az elvárható lenne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Válassza le a vértelenítő mandzsettát a készülékről. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1800 / 1801	Alacsony	Technikai hiba	-	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1802 / 1803	Alacsony	Technikai hiba	A készülék belső hibája.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leghamarabb lépjen ki az alkalmazásból, miközben a készüléket folyamatosan figyelemmel kíséri. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Végezze el a funkcióellenőrzést az alkalmazási helyiségen kívül (lásd a "12. A működőképesség ellenőrzése" című fejezetet). ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
			A HF sebészeti eszközöket, beleértve a vezetékeket (pl. a monopoláris elektróda és a semleges elektróda vezetékeit), túl közel helyezték a Tourniquet Touch készülékhez, vagy ráhelyezték a készülékre.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leggyorsabban fejezzük be a használatot folyamatosan ellenőrzés mellett. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Végezze el a funkcióellenőrzést az alkalmazási helyiségen kívül (lásd a "12. A működőképesség ellenőrzése" című fejezetet). ▶ Ellenőrizze az ellátóhálózatot az alkalmazási helyiségben, és növelje a távolságot a Tourniquet Touch és a HF sebészeti egységek között, beleértve a kábeleket is. Ha szükséges, használjon másik hálózati csatlakozót. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
1900	Magas	Technikai hiba	-	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
2000 / 2001	Alacsony	Érzékelő hiba	Érzékelő eltérés	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leggyorsabban fejezzük be a használatot folyamatosan ellenőrzés mellett. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Végezze el a kalibrálást az alkalmazási helyiségen kívül (lásd a "17.1.1 Kalibrálás" című fejezetet). ▶ Ha az eltérés nagyobb, mint +/- 5 Hgmm, azonnal jelezze a készüléket hibásnak, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
2002 / 2003	Magas			

Optikai riasztás	Prioritás	Hiba / meghibásodás	Ok	Hibaelhárítás
 Folyamatos piros fény	Magas	Ez a hibaüzenet a táblázatban szereplő más hibaüzenetekkel együtt jeleníthető meg (lásd a "14.1 A riasztások fajtái és rangsora" című fejezetet).		
		Technikai hiba	A készülék belső hibája.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leggyorsabban fejezzük be a használatot folyamatosan ellenőrzés mellett. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Végezze el a funkcióellenőrzést az alkalmazási helyiségen kívül (lásd a "12. A működőképesség ellenőrzése" című fejezetet). ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
		A készülékek zavarják a Tourniquet Touch-ot (pl. EMC interferencia).	A HF sebészeti eszközöket, beleértve a vezetékeket (pl. a monopoláris elektróda és a semleges elektróda vezetékeit), túl közel helyezték a Tourniquet Touch készülékhez, vagy ráhelyezték a készülékre.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leggyorsabban fejezzük be a használatot folyamatosan ellenőrzés mellett. ▶ Értékeljük a hibaüzeneteket. ▶ Használat után kapcsolja ki a készüléket. ▶ Végezze el a funkcióellenőrzést az alkalmazási helyiségen kívül (lásd a "12. A működőképesség ellenőrzése" című fejezetet). ▶ Ellenőrizze az ellátóhálózatot az alkalmazási helyiségben, és növelje a Tourniquet Touch és a HF sebészeti egységek közötti távolságot, beleértve a kábeleket is. Ha szükséges, használjon másik hálózati csatlakozót. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.

15.3 ÁLTALÁNOS HIBÁK

Hiba / meghibásodás	Ok	Hibaelhárítás
A készüléket nem lehet működtetni, illetve a vértelenítő mandzsettát nem lehet leereszteni.	Eszközhiba	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A lehető leghamarabb állítsa le az alkalmazást. ▶ Húzza ki a mandzsettacső és a mandzsettacsatorna közötti csatlakozást. ▶ Kapcsolja ki a készüléket a  gombbal. ▶ Indítsa újra a készüléket. ▶ Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a gyártóhoz.
A készülék nem kapcsolható be.	Biztosító hibás	Cserélje ki a biztosítékot (lásd a "17.2 Javítás" fejezetet).
	A készülék nincs csatlakoztatva a hálózatra. Az akkumulátor mélyen lemerült.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A töltési folyamat több órát is igénybe vehet.
A  gomb egymás után ötször villog.	A készülék akkumulátorának töltöttsége túl alacsony. A készülék nem áll készen a működésre.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A töltési folyamat néhány perctől akár egy óráig is eltarthat.
A készülék nem kapcsolható ki.	A vértelenítő mandzsetta felfújott állapotban van.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Engedje le a levegőt a vértelenítő mandzsettából a  csúszka segítségével. ▶ Válassza le a vértelenítő mandzsettát a készülékről. ▶ Kapcsolja ki a készüléket a  gombbal.
A készülék önállóan be- és kikapcsolja magát.	Az egység egy HF-sebészeti egység vagy egy HF-szűrőterem közelében található.	Tartsa be az EMC-interferenciára vonatkozó biztonsági előírásokat (lásd a "4. Biztonsági előírások" fejezetet).
Az érintőképernyő nem működik.	Az egység egy HF-sebészeti egység vagy egy HF-szűrőterem közelében található.	Tartsa be az EMC-interferenciára vonatkozó biztonsági előírásokat (lásd a "4. Biztonsági előírások" fejezetet).
	Egy tárgy hosszabb ideig fekszik az érintőképernyőn. Az érintőképernyő kalibrálása folyamatban van.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Távolítsa el a tárgyat az érintőképernyőről. ▶ Kapcsolja ki a készüléket a  gombbal. ▶ Indítsa újra a készüléket.
	Az érintőképernyőt oldalról kezelték.	Kezelje az érintőképernyőt előlről.

16. ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSI (EMC) TÁBLÁZAT

A készülék megfelel a táblázatban megadott szabványoknak.

Emissziós teszt

Jelenség	Alap EMC szabvány és mérési mód	Csoport/Osztály/Vizsgálati paraméterek
Hálózati csatlakozás interferenciája (feszültség és áram)	CISPR-11	Group 1 - Class A 0,15 MHz - 30 MHz
Kisugárzott nagyfrekvenciás elektromágneses mező	CISPR-11 CISPR-32	Group 1 - Class A 30 MHz - 1000 MHz 1 GHz - 6 GHz
Harmonikus interferencia	IEC 61000-3-2	Class A
Lebegés	IEC 61000-3-3	230 V / 50 Hz

Zavartűrési tesztek

Jelenség	Alap EMC szabvány és mérési mód	Zavartűrési értékek
Elektrosztatikus kisülés	IEC 61000-4-2	Érintkezéssel történő kisülés: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV Kisülés levegőn keresztül: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
Kisugárzott, rádiófrekvenciás és elektromágneses mező	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz AM 80% at 1 kHz
Gyors transziens elektromos zavarok (Burst)	IEC 61000-4-4	±1 kV, ±2 kV Burst frequency 5 / 100 kHz
Lökőfeszültség (vezeték és vezeték között)	IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV
Lökőfeszültség (vezeték és föld között)	IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV
Rádiófrekvenciás tér által generált vezetési zavarok	IEC 61000-4-6	10 V 0,15 MHz - 80 MHz 80 % AM at 1 kHz

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

A jelen útmutatóban nem leírt javításokat csak a gyártó vagy a gyártó által felhatalmazott személyek végezhetik.

Az ehhez szükséges információkat a meghatalmazott személy egy külön szervizkönyvben kapja meg.


17. KARBANTARTÁS

A karbantartás után ellenőrizni kell a biztonság és a funkcionalitás szempontjából lényeges szerkezeti és működési jellemzőket.

Csak a jelen használati utasításban meghatározott munkákat szabad elvégezni.

Ha az orvostechnikai eszközön egyéb munkálatokat végeznek, minden garancia- vagy jótállási igény elvész.


Dátum/idő beállítása

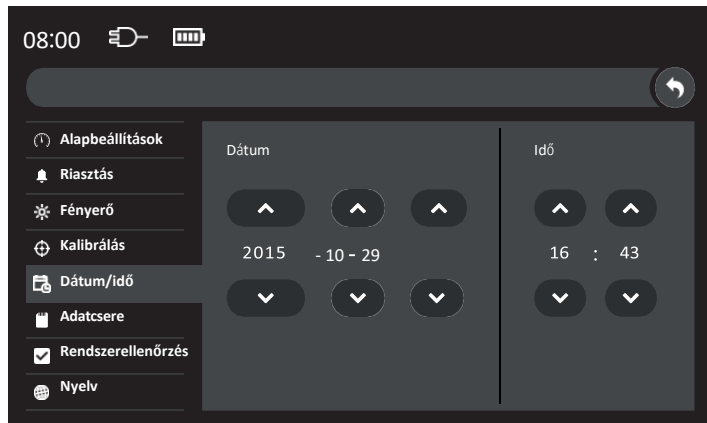

▶ Állítsa be a dátumot a / gombokkal.

▶ Állítsa be az időt a / gombokkal.

A nyelv beállítása

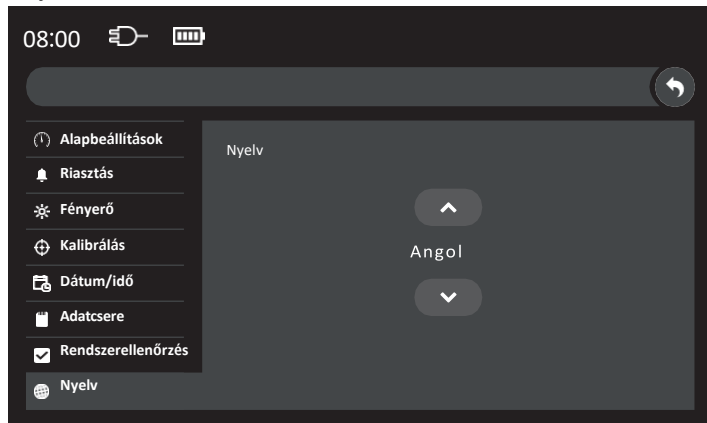

▶ Válassza ki a nyelvet a / gombokkal.

Adatcsere



VIGYÁZAT

- A gyártó megtiltja a hálózati telepítést az USB-porton.
- Az USB-port csak szervizelési célokra szolgál.
- A kompatibilitás szempontjából tesztelt USB-stickek kizárólag szervizcélokra használhatók.
- A szoftverfrissítéseket csak a kompatibilitás szempontjából tesztelt USB-stickekkel végzik el.

A készülék a következő funkciókat kínálja:

- Naplófájl mentése
- Szoftverfrissítés telepítése

Naplófájl mentése

A készülék vizsgálata céljából a gyártónak szüksége lehet a naplófájra. Ezt az alábbiak szerint menthetjük el az USB memóriába:

- ▶ Helyezzünk be egy USB memóriát a csatlakozóba.
- ▶ Nyissuk meg az itt látható ablakot.
- ▶ Mentjük a log fájlt a gomb megnyomásával.

Amikor a log fájl az USB memóriába íródott, akkor a szimbólum jelenik meg a képernyőn.

Szoftverfrissítés telepítése

Az esetleges szoftverfrissítésekkel kapcsolatban a gyártóval kell felvenni a kapcsolatot.

A kompatibilitást a következő USB-kkel teszteltük:

- SanDisk ULTRA Fit; USB 3.0
- 16 GB, Intenso Slim Line; USB 3.0
- 16 GB, Kingston DT 50; USB 3.0; GB16

17.1 ELLENŐRZÉS



FIGYELMEZTETÉS

A készülék ellenőrzését évente el kell végezni.

A készülék ellenőrzéséhez a "17.1.1. Kalibrálás", "17.1.2. Önellenőrzés" és "17.1.3. Szivárgásvizsgálat" fejezeteket kell elvégezni.

17.1.1 KALIBRÁLÁS



VIGYÁZAT

- Minden tömlőcsatlakozásnak szilárdan a helyére kell pattannia.
- Ne használjon sérült csatlakozókat és spirálcatlakozó tömlőket.
- Ne gyűrje meg a spirálcatlakozó tömlőket és a mandzsettatömlőket.

A kalibráció célja annak ellenőrzése, hogy a mérési pontosság a gyártó által specifikált tűrési tartományban van-e.

MEGJEGYZÉS


A készülék újra kalibrálását csak a gyártó végezheti el.



- ▶ Csatlakoztassuk a kék spirál összekötő csövet az 1. csatornához.
- ▶ Csatlakoztassuk a referenciaként szolgáló mérőeszközt a kék spirálcsőhöz egy megfelelő összekötő elem segítségével.

A nyomás stabilizációja céljából egy nem táguló tartályt kell a készülék és a referencia készülék közé kapcsolnunk, melynek térfogata minimum 50 cm³ és maximum 500 cm³ közé esik. Az ellenőrzést több nyomásértéken el kell végeznünk. Az ellenőrzésnek a készülék teljes nyomástartományát le kell fednie.

- ▶ Nyissuk meg a Beállítások menüt a gomb segítségével.

Válassza ki a "Kalibrálás" vezérlőpanelt.

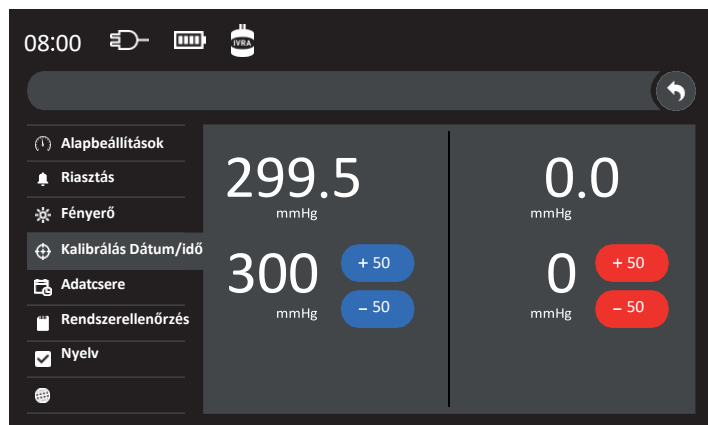

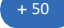- ▶ Állítsa be a kiválasztott nyomást a  /  gombokkal.
- ▶ Olvassuk le az 1. csatorna felső nyomásértékét.
- ▶ Olvassuk le a referencia eszközön is a nyomásértéket.




VIGYÁZAT



Ha az eltérés nagyobb +/- 5 Hgmm-nél, azonnal jelöljük meg a készüléket hibásnak és értesítsük a gyártót.

- ▶ Ismételjük meg az eljárást, amíg az ellenőrzést minden kívánt nyomásértéken el nem végeztük.
- ▶ Ugyanígy járjuk el a 2. csatorna esetében is.

17.1.2 ÖNELLENŐRZÉS

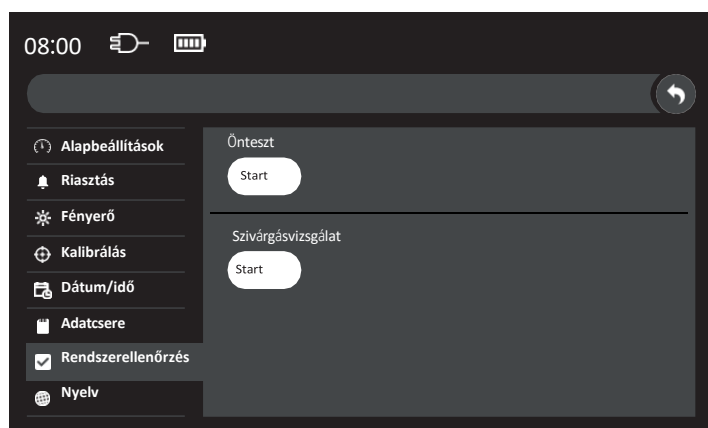- ▶ Válassza le a spirál csatlakozó csöveket és a vértelenítő mandzsettát a készülékről.
- ▶ Válassza a "Rendszerellenőrzés" menüpontot a vezérlőpanelen.




- ▶ Indítsuk el az öntesztet az  gombbal.
- Az önteszt során az alábbi ellenőrzések történnek meg:
- Feszültségek és a készülék hőmérséklete
 - Az elsődleges és másodlagos sűrített levegő rendszer az 1. és 2. csatorna számára
 - Minden adattároló eszköz
 - Akkumulátor
 - Szoftver és hardver verzió
 - Minden hallható risztó rendszer
- A végrehajtott önteszt eredménye megjelenik a képernyőn.
- ▶ Zárjuk be az üzenet ablakát a  gombbal.



VIGYÁZAT


Ha a készülék nem megy át az önellenőrzésen, indítsuk újra a készüléket. ha a hiba továbbra is fennáll, akkor értesítsük a gyártót.

17.1.3 SZIVÁRGÁSVIZSGÁLAT

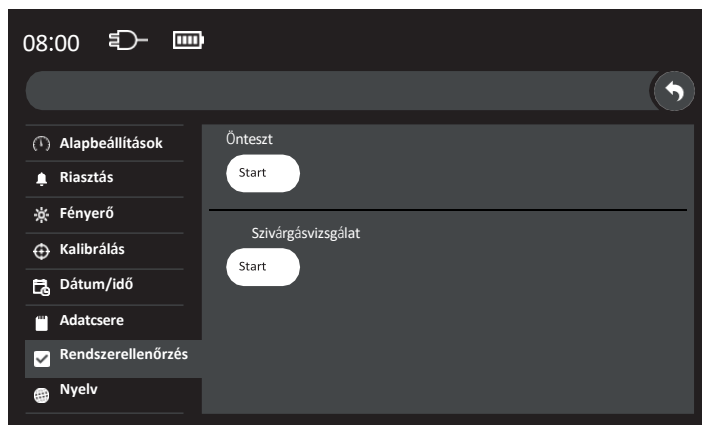

VIGYÁZAT

A tesztcsatlakozókank szilárdan kell rögzülniük.

- ▶ Csatlakoztassuk a spirál összekötőcsöveket színekódjuknak megfelelően az 1. és 2. csatornához. Mindkettőhöz csatlakoztassuk a tömítettség ellenőrzésére szolgáló záróelemet.
 - ▶ Indítsuk el a szivárgási tesztet a  gomb megnyomásával.
- A szivárgási teszt 180 másodpercet vesz igénybe.
Az eltérést mutatja a kijelző.




VIGYÁZAT

Ha az eltérés meghaladja a +/- 15 Hgmm értéket, akkor haladéktalanul jelöljük meg a készüléket hibásnak és értesítsük a gyártót.


17.2 Biztosítékcseré



- ▶ A készülék hálózati csatlakozását szüntessük meg.
- ▶ Húzzuk ki a V-Lock tápcsatlakozót az aljzatból. Eközben nyomjuk be az ① rezeselő gombot.

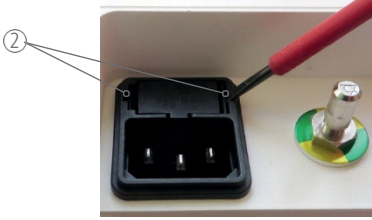

- ▶ Pattintsuk ki a biztosítéktartó házat egy lapos csavarhúzó segítségével ②.

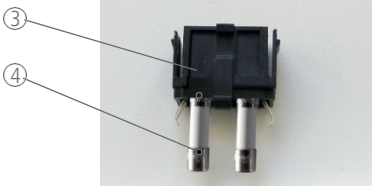

- ▶ Emeljük ki a biztosítéktartót ③ és vegyük ki a biztosítékokat ④ a nyílásból.
- ▶ Távolítsuk el a hibás biztosítékot a biztosítékok tartójából.
- ▶ Helyezzünk be egy új biztosítékot (2x Littelfuse 215 Series: T2,5 AH, 250 V, 5 x 20 mm) a biztosítéktartóba.



- ▶ Helyezzük vissza a biztosítéktartót a helyére.

MEGJEGYZÉS

A biztosítéktartónak ⑤ mindkét szélén be kell pattannia a helyére.

További javításokat csak a gyártó végezhet a készüléken.

18. A KÉSZÜLÉK VISSZAKÜLDÉSE JAVÍTÁSRA

A gyors javítás előfeltétele, hogy a lehető legpontosabb hibaleírást adjunk a készülékhez. A visszaküldött orvostechnikai eszközöket előzetesen alaposan meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell (lásd a "19. Fertőtlenítés törléssel" című fejezetet), hogy a gyártó alkalmazottai ne legyenek veszélyben. A gyártó fenntartja a jogot, hogy biztonsági okokból visszautasítsa a szennyezett készülék javítását.

19. FERTŐTLENÍTÉS TÖRLÉSEL



VIGYÁZAT

- A készüléken nem szabad automatikus tisztítási, fertőtlenítési eljárásokat alkalmazni, nem szabad sterilizálni.
- A készüléket nem szabad folyadékba mártani.

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsológombbal.
- ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- ▶ Távolítsa el a csatlakozó tömlőket a készülékről.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket és a csatlakozótömlőt az alábbiak szerint:

A törléssel történő fertőtlenítést a kereskedelemben kapható alkohol- vagy QAV (kvaterner ammóniumvegyület) alapú felületfertőtlenítő szerekkel kell elvégezni. A fertőtlenítőszer kiválasztásakor megfelelő hatásspektrumú fertőtlenítőszerrel kell használni: baktériumölő, gombaölő, vírusölő hatásúakat. A törléssel történt fertőtlenítés után ellenőrizze a készüléket a látható szennyeződések szempontjából. Ha szükséges, ismétlje meg a törléskendővel történő fertőtlenítést. A törlésfertőtlenítés után ellenőrizze a készülék működését (lásd a "12. Működés ellenőrzése" című fejezetet).

20. A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAMA

Tourniquet Touch TT20

A készülék élettartama rendeltetésszerű használat esetén 7 év.

Gyártás dátuma: lásd a típustáblát.

Csatlakozó tömlő

A csatlakozótömlő élettartama 8 év.

21. TENNIVALÓK A HASZNÁLATBÓL KIVONT KÉSZÜLÉKKEL, HULLADÉKKEZELÉS

A készüléket és az akkumulátort külön kell megsemmisíteni.

- ▶ Vegye ki az akkumulátort a készülékből.

Elektromos és elektronikus berendezések



Ne dobja ki az elektromos és elektronikus berendezéseket a háztartási hulladékba. Az EU-n belüli ártalmatlanításnak a 2012/19/EU irányelvnek (WEEE-irányelv) megfelelően kell történnie. Az EU-n kívüli országokban a készüléket a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Akkumulátor

A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amely a működéshez vagy bizonyos funkciókhoz szükséges.



Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba. Az akkumulátort a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.



VIGYÁZAT

Védje az akkumulátort a hőtől, ne nyissa ki, ne zárja rövidre, ne merítse vízbe, és ne dobja tűzbe.

Tartozékok














A használt vagy sérült termékeket a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

22. CIKKSZÁMOK

REF	Megnevezés	Használható eszközök:		
		"13.1. Használat szimpla mandzsettával	"13.2. Használat két szimpla mandzsettával bilaterális sebészet esetén"	"13.3. Használat dupla mandzsettával (IVRA)"
01-20-000	Tourniquet Touch TT20			
	Pótalkatrészek			
20-20-744	Spirális csatlakozótömlő kék; kinyújtott hossza 3,0 m	x	x	x
20-20-742	Spirális csatlakozótömlő piros; kinyújtott hossza 3,0 m		x	x
20-20-944	Sima csatlakozótömlő kék; hossza 4,5 m	x	x	x
20-20-942	Sima csatlakozótömlő piros; hossza 4,5 m		x	x
01-00-510	Spirális csatlakozótömlő kék; kinyújtott hossza 6,0 m	x	x	x
01-00-520	Spirális csatlakozótömlő piros; kinyújtott hossza 6,0 m		x	x
22-50-406	Záródugó (tesztcsatlakozó) az, mandzsettacsatornához			
01-00-410	Hálózati kábel EU, V-Lock, 4 m			
01-00-420	Hálózati kábel CH, V-Lock, 4 m			
01-00-430	Hálózati kábel GB, V-Lock, 4 m			
01-00-440	Hálózati kábel US, V-Lock, 4 m			
01-00-450	Hálózati kábel CN, V-Lock, 5 m			
01-00-460	Hálózati kábel AU, V-Lock, 4 m			
01-00-470	Hálózati kábel JP, V-Lock, 4 m			
	Tartozékok			
01-00-100	Állvány kosárral a Tourniquet számára			
	Egyszer használatos vértelenítő mandzs etták			
20-34-700SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, csecsemő, hossza 20 cm	x	x	
20-34-710SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, gyermek, hossza 30 cm	x	x	
20-34-711SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta karra, hossza 35 cm	x	x	
20-34-712SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta karra, hosszú, hossza 46 cm	x	x	
20-34-715SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, alsó lábszárra / karra, kónuszos, hossza 46 cm	x	x	
20-34-722SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, lábra, kónuszos, hossza 61 cm	x	x	
20-34-727SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, lábra, hosszú, kónuszos, hossza 76 cm	x	x	
20-34-728SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, lábra, extra hosszú, kónuszos, hossza 86 cm	x	x	
20-34-729SLZ-1	Tourniquet Dispo szimpla mandzsetta, lábra, szuper hosszú, kónuszos, hossza 107 cm	x	x	
20-30-710SLZ-1	Tourniquet Dispo dupla mandzsetta, gyermek, hossza 30 cm			x
20-30-712SLZ-1	Tourniquet Dispo dupla mandzsetta, karra, hosszú, hossza 46 cm			x
20-30-722SLZ-1	Tourniquet Dispo dupla mandzsetta, lábra, hossza 61 cm			x
	Többször használható vértelenítő mandzsetták			
20-75-700	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, hossza 20 cm	x	x	
20-75-710	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, hossza 30 cm	x	x	
20-75-711	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, hossza 35 cm	x	x	
20-75-712	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, hossza 46 cm	x	x	
20-75-715	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, kónuszos, hossza 46 cm	x	x	
20-75-722	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, kónuszos, hossza 61 cm	x	x	
20-75-727	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, kónuszos, hossza 76 cm	x	x	
20-75-728	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, kónuszos, hossza 86 cm	x	x	
20-75-729	Tourniquet Wipe szimpla mandzsetta, kónuszos, hossza 107 cm	x	x	
20-77-710	Tourniquet Wipe dupla mandzsetta, hossza 30 cm			x
20-77-712	Tourniquet Wipe dupla mandzsetta, hossza 46 cm			x
20-77-722	Tourniquet Wipe dupla mandzsetta, hossza 61 cm			x
20-54-700	Szimpla mandzsetta, csecsemő, hossza 20 cm	x	x	
20-54-710	Szimpla mandzsetta, gyermek, hossza 30 cm	x	x	
20-54-711	Szimpla mandzsetta, karra, hossza 35 cm	x	x	
20-54-712	Szimpla mandzsetta, karra, hosszú, hossza 46 cm	x	x	
20-54-729	Szimpla mandzsetta, lábra, szuper hosszú, hossza 107 cm	x	x	
20-54-512	Szimpla mandzsetta, alsó lábszárra / karra, kónuszos, hossza 46 cm	x	x	
20-54-522	Szimpla mandzsetta, lábra, kónuszos, hossza 61 cm	x	x	
20-54-527	Szimpla mandzsetta, lábra, hosszú, kónuszos, hossza 76 cm	x	x	
20-54-528	Szimpla mandzsetta, lábra, extra hosszú, kónuszos, hossza 86 cm	x	x	
20-50-700	Dupla mandzsetta, csecsemő, hossza 20 cm			x
20-50-710	Dupla mandzsetta, gyermek, hossza 30 cm			x
20-50-711	Dupla mandzsetta, karra, hossza 35 cm			x
20-50-712	Dupla mandzsetta, karra, hosszú, hossza 46 cm			x
20-50-722	Dupla mandzsetta, a lábra, hossza 61 cm			x
20-50-727	Dupla mandzsetta, lábra, hosszú, hossza 76 cm			x

REF	Megnevezés	Használható eszközök:		
		"13.1. Használat szimpla mandzsettával"	"13.2. Használat két szimpla mandzsettával bilaterális sebészet esetén"	"13.3. Használat dupla mandzsettával (IVRA)"
20-50-728	Dupla mandzsetta, lábra, extra hosszú, hossza 86 cm			X
20-50-729	Dupla mandzsetta, lábra, szuper hosszú, hossza 107 cm			X
20-64-700	Szilikon mandzsetta, csecsemő, hossza 20 cm	X	X	
20-64-710	Szilikon mandzsetta, gyermek, hossza 30 cm	X	X	
20-64-611	Szilikon mandzsetta, karra, hossza 35 cm	X	X	
20-64-612	Szilikon mandzsetta, karra, hosszú, hossza 46 cm	X	X	
20-64-512	Szilikon mandzsetta, alsó lábszárra / karra, kónuszos, hossza 46 cm	X	X	
20-64-522	Szilikon mandzsetta, lábra, kónuszos, hossza 61 cm	X	X	
20-64-527	Szilikon mandzsetta, lábra, hosszú, kónuszos, hossza 76 cm	X	X	
20-64-528	Szilikon mandzsetta, lábra, extra hosszú, kónuszos, hossza 86 cm	X	X	
20-60-711	Szilikon dupla mandzsetta, karra, hossza 35 cm			X
20-60-712	Szilikon dupla mandzsetta, karra, hosszú, hossza 46 cm			X
20-60-722	Szilikon dupla mandzsetta, lábra, hossza 61 cm			X

23. SZIMBÓLUMOK

	Orvostechnikai eszköz
	Gyártó
	A gyártás dátuma
	Cikkszám
	Sorozatszám
	Típus
	Kövesse a használati utasításokat
	Kövesse a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Nem használható MRI környezetében
	Vigyázat: A termék orvos általi értékesítése vagy felírása a szövetségi törvények értelmében korlátozások alá esik. Csak az USA-ra és Kanadára vonatkozik.
	Hőmérsékleti határérték
	Levegő páratartalma, korlátozás

	Légnyomás, korlátozás
	B típusú érinthető részek
	Potenciálkiegyenlítés (POAG)
	Ne dobja ki az elektromos és elektronikus berendezéseket kommunális hulladékgyűjtőbe.
	Ne dobja ki az akkumulátorokat kommunális hulladékgyűjtőbe
	CE-jelölés tanúsító testület azonosítószámával.
	Ez a készülék bizonyos veszélyes anyagokat tartalmaz, de a szimbólum közepén jelzett számnak megfelelő alkalommal újra használható a környezet veszélyeztetése nélkül. Ezután az újrahasznosítási eljárának kell alávetni.
	Ha > 5° lejtésű felületen használjuk, akkor a gördülő állvány felborulhat. A gördülő állvány szállítása során a reá vonatkozó használati utasítás (004-01-0336 - Mobile Stand, chapter "Transport conditions") szerint kell eljárunk.
	VIGYÁZAT Áramütés veszélye Ne nyissa ki. A javításokat csak szakképzett személy végezze el

Biztosan üres marad.